

シュッ!と入れて ポンッ!と取付け

Shoe-Pon!

シューポン!

シューズカバー取付器

スリッパ
不要

靴の汚れ
から
床をガード

ポンッ!

踏むだけ
ワンタッチ

かがまず
装着可能




本体に貼って
表示できる
使い方プレート付

踏むだけワンタッチ装着!
最大設置枚数40枚!
いろんな場所で活躍します。



病院

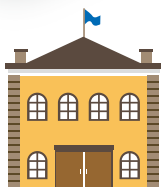

ホテル



食品関係



イベント



ショールーム



工場見学

『シューポン!』は、踏むだけワンタッチでシューズカバーを装着できる便利なシューズカバー取付器です。病院、ホテル、クリーンルーム、イベント、ショールーム、工場見学など、様々なシーンで活躍します。

手を汚さず
衛生的!



Step 1 足をシューポンに入れて…



Step 2 ゆっくり下へ踏み込むとカチッと音がして…



Step 3 自動的にシューズカバーが取付けられます!



注意：踏み込む際は、均等に踏むようにしてください。



シューズカバー取付器 シューポン

商品コード	価格
900-570	¥9,800 (税抜)



【サイズ】42×21.5×13cm
【重量】1.35kg
【材質】PP プラスチック
【付属品】専用シューズカバー 100 枚
シューズサイズ：30cm まで可

■ JAN コード

4571263733739

シューポン専用 シューズカバー

規格	商品コード	価格
①1パック (100枚入)	900-571	¥2,480 (税抜)
②10パック (1000枚入)	900-572	¥23,000 (税抜)

【材質】PE

■ JAN コード

規格	JANコード
①1パック (100枚入)	4571263733982
②10パック (1000枚入)	4571263736549

簡単に装着!

< シューズカバーのセット方法 >



シューズカバー(10枚束)に付いているT字クリップを、容器角のT字口へ引っ掛けながら下へ押します。
注意：セットする前にリボンをほどかないでください。



①で取り付けた箇所の対角にシューズカバーを引っ張り、①と同様にT字クリップを下へ押しながらセットします。



他2箇所も同様にT字クリップをセットし、4箇所取り付け終わったらT字クリップをまとめているリボンを取り除きます。



既にセットされたシューズカバー(10枚束)のT字クリップを下に押しながら、新たなシューズカバー(10枚束)をセットします。合計で40枚までセットできます。



シューズカバーを容器に合わせてしっかりと整えます。歪みがあると正しく作動しない場合があります。



図のように、一番上のT字クリップが、下のT字クリップよりも約1mmほど内側に入った状態を確認してください。開きが確認できない場合は、一度T字クリップを押しながらセットし直してください。

■製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
■このカタログは、2017年1月現在のものです。

sanwa

株式会社三和製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8
TEL: 03-5607-7811 FAX: 03-5607-7812
http://www.sanwa303.co.jp

安心をサポートするお近くの代理店