

急な嘔吐物処理を
安全に！ 迅速に！

そのまま 使えるセット

セット内容

- 1 キャリーバケツ**
カゴとバケツは離れるので、処理したものをバケツに入れ、セット品も同時にまとめられて便利。
- 2 ジアクイック 200 1L**
希釈不要の次亜塩素酸ナトリウム 200ppm。嘔吐物を拭き取った後の床などの除菌に。
- 3 ジアクイック 1000 1L**
希釈不要の次亜塩素酸ナトリウム 1000ppm。処理した嘔吐物に浸し、菌の拡散を防ぎます。
- 4 メディクロール 400mL**
感染予防・嘔吐物処理後の除菌・消臭に使用します。
- 5 スピードフリーズ 300g**
嘔吐物を素早く固めて処理できます。
- 6 スピードプロテクト 3組**
二次感染を予防するディスボウエアのセット。
- 7 ディスポチリトリ 3枚**
紙製の使い捨てチリトリとヘラのセット。
- 8 抗菌ソフトペーパータオル 150組×2**
固めた嘔吐物を集めて処理する抗菌ペーパータオル。

スピード グリーン Quick

オリジナル医療衛生用品
san medy
ブランド

嘔吐物処理キット 8点セット
スピードクリーンQuick

902-034 **¥7,800** (税込¥8,580)

スピードクリーン Quick の使い方

1 身に着ける

6を身に着けます。
手袋は短→長の順で
はめましょう。


ビニール製の長袖エプロン&
ロンググローブで服や体への感染物の
付着を防ぎます。

感染物を踏み広げないための
シューズカバー




2 固める

5を嘔吐物に、まんべんなく
ふりかけ固めます。

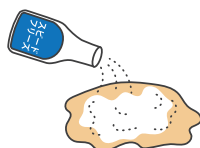

3 集める


ウイルスが飛び散らないよう、
嘔吐物を7で静かに集め取り
手袋(長)と一緒にビニール袋に
入れます。

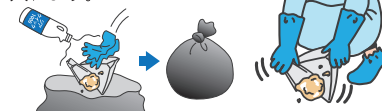

4 拭き取る

床に8を敷き、2を浸すように
床を拭き取ります。
その後、水拭きします。


嘔吐物は思ったよりも
広範囲に飛び散ります。
拭き取りは広めに行くと
より良いでしょう。

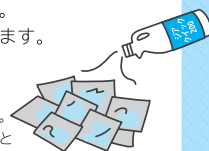

5 廃棄

廃棄は自治体の指定する方法で行ってください。

処理に使用した6,7,8はビニール袋に入れ、
廃棄物が浸る量の3を入れて
密閉して廃棄します。

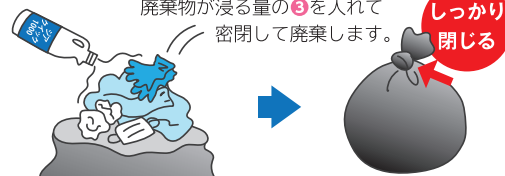

6 除菌と消臭


処理後、4で室内空間、服、
ドアノブなどの
除菌・消臭を
しましょう。



7 補充

次に備えて使った
物品を補充
しましょう！

以上で終了です！

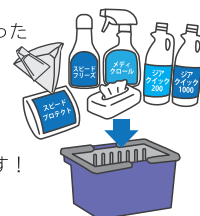

最後は
手洗いも
忘れずに！

3回分+α 使える

嘔吐物処理・感染対策の 人気のセット

抗菌ソフト
ペーパータオル
150組

チェアバケツ
9L

スポイト
10mL

スピード グリーンEX

オリジナル医療衛生用品
san+medy
ブランド

メディクロール
400mL

次亜塩素酸ソーダ
500mL

ロングセラー
商品

ディスポチリトリ 3枚

スピード
フリーズ
300g

スピード
プロテクト 3組

嘔吐物処理キット 8点セット
スピードクリーンEX

- 厚生労働省が推奨する嘔吐物処理方法を基準にした構成内容です。
- チェアバケツがそのまま収納容器になるため、管理がカンタンです。

902-035 | **¥5,700** (税込¥6,270)

教室ごとに備えておきたい 1回使い切りのミニパック

スピード
フリーズ 30g

スピード
プロテクト
1組

- 消耗品をまとめていますので、補充用として、またお試用としてお使いいただけます。

スピード グリーンEX mini

ディスポチリトリ 1枚

抗菌ソフト
ペーパータオル10組

オリジナル医療衛生用品
san+medy
ブランド

嘔吐物処理キット 4点セット
スピードクリーン EXmini

902-036 | **¥1,200** (税込¥1,320)

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
- 商品のサイズ、質量などは全て（約）の値です。
- このカタログは、2023年7月現在のものです。 [10135]

sanwa

株式会社 三和製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8
tel.03-5607-7811(代) fax.03-5607-7812
<https://www.sanwa303.co.jp>

健康をサポートするお近くの代理店