

1分1秒でも
早く!

女性へのAED使用率向上のために!
命と勇気を守る
プライバシー保護用シート



まもるまる

MAMORUMARU



AEDパッドを
素肌に貼る



- 1 AEDの電源を入れる
- 2 AEDの電源を開く
- 3 AEDのパッドを貼る
- 4 AEDの指示に従う

胸骨圧迫を続けながら
AEDの指示に従ってください

胸骨圧迫を続けながら
AEDの指示に従ってください

- 1 AEDの電源を入れる
- 2 AEDの電源を開く
- 3 AEDのパッドを貼る
- 4 AEDの指示に従う



倒れた人の命と、
助ける人の勇気を守りたい

女子学生が考案！

プライバシー保護用シート「まもるまる」


MAMORUMARU

女性へのAED使用率低下の背景

女性へのAED使用率が低い原因の一つとして、救命処置の際、肌直接接触したり見たりすることへの抵抗感が考えられています。心停止で倒れた人を救いたいという思いがあるにもかかわらず、その抵抗感が障壁となり救命処置が行われなことがあります。

プライバシー保護と効率的な救命処置

「まもるまる」は体を簡単に覆うことができるシートです。このシートを使えば、倒れた人の体が露出されるのを防いだまま、迅速にAEDの使用・胸骨圧迫を行うことができます。もちろん、抵抗感があるのは女性だけとは限りません。このシートはさまざまな環境でさまざまな方にご使用いただけます。コンパクトに折りたためるので、AEDボックス内に収納可能です。

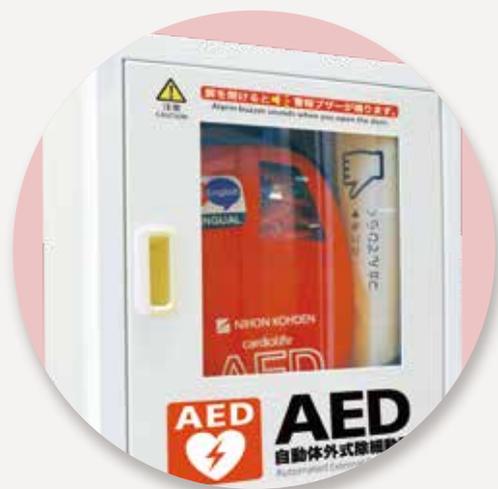

《使い方》



AEDとともに到着
まもるまるをかぶせる
AEDパッドをはる

- コの字型の切り込み**
ここから手を入れてAEDパッドを貼る。パッドや胸骨圧迫の位置が確認できる。
胸骨圧迫でずれないように面ファスナーが2か所に付いており、留められる。
- シンプルなイラスト**
緊急時でも手順が一目でわかる。
- 手順の向きを工夫**
通常横から救命措置を行うため、見やすい。
- 首の後ろで面ファスナーを留める**
頭を持ち上げる必要がなく、迅速に対応することが可能となる。
- 折りたたみ式**
コンパクトに収納でき、開くだけですぐに使える！

まもるまる

(AED使用時 プライバシー保護用シート)

アカデミック版

912-346

¥3,800 (税込¥4,180)

【サイズ】縦950×横700mm【質量】120g【材質】ポリエステル

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
- 商品のサイズ、質量などは全て（約）の値です。
- このカタログは、2024年7月現在のものです。 10582

sanwa

株式会社 三和製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8
tel.03-5607-7811(代) fax.03-5607-7812
<https://www.sanwa303.co.jp>

皆様をサポートするお近くの代理店