

選べる3タイプ。
学校健診や医療現場などに
最適な一台を。



●専用ソフトケース



- (セット内容)
- 本体
 - ヘッドホン
 - 応答スイッチ
 - ACアダプタ
 - ブックカバー
 - 専用ソフトケース

適合規格	JIS T1201-1 (2020)
タイプ別表示	タイプ4
周波数	250、500、1000、2000、3000、4000、6000Hz
周波数精度	±2%以内
聴力レベル	-10~70dB、5dB間隔
出力音圧精度	±3dB (250~4000Hz)、±5dB (6000Hz)
電源	AC100V 50/60Hz

学校検診		
選別周波数	1000Hz	4000Hz
聴力レベル	30dB	25dB

一般検診 雇い入れ時		
選別周波数	1000Hz	4000Hz
聴力レベル	30dB	30dB

一般検診 定期検査		
選別周波数	1000Hz	4000Hz
聴力レベル	30dB	40dB



商品専用
WEBページ



BOOK
AUDIO
ブックオーディオ
オーディオメータ JISタイプ4

ボタン2つで、
聴力検査がもっと
スムーズに。

※特許出願中 特願2025-049208

ブックオーディオ MTD

①1人用	913-840	¥108,000	(税込¥118,800)
②2人用	913-841	¥128,000	(税込¥140,800)
③5人用	913-842	¥198,000	(税込¥217,800)

【サイズ】本体:W25.7×D15×H2.3cm ソフトケース:①②W34.5×D16×H25cm ③W34.5×D25×H19.5cm
【重量】総重量:1人用:710g・2人用:970g・5人用:3050g

JQA検定品

ブックオーディオ MTDJ

①1人用	913-843	¥123,000	(税込¥135,300)
②2人用	913-844	¥153,000	(税込¥168,300)
③5人用	913-845	¥245,000	(税込¥269,500)

【サイズ】本体:W25.7×D15×H2.3cm ソフトケース:①②W34.5×D16×H25cm ③W34.5×D25×H19.5cm
【重量】総重量:1人用:710g・2人用:970g・5人用:3050g

JQA検定品とは
財団法人日本品質保証機構(JQA)による検査合格品です。JQAによる検査(校正)に合格した商品には次回校正推奨年月(校正を行った月の1年後)を記載した校正ラベルが貼付されます。

【医療機器認証番号】(ブックオーディオ MTD-1)307AGBZX00019000(ブックオーディオ MTD-2)307AGBZX00019A01(ブックオーディオ MTD-5)307AGBZX00019A02

すべてのメーカーのオーディオ校正を承ります! ご相談ください。

年に1回の校正はお済みですか?



■すべてのオーディオメータに対応
ブックオーディオはもちろん、すべてのメーカー品に校正対応いたします。
※他メーカーのオーディオメータの校正において、修理が必要と判断された場合は、部品などの関係上、弊社での修理はお受けできません。その際は製造メーカーまでお問い合わせをお願いいたします。

■新規買い替えのサポート
オーディオメータの校正の際、JIS規格不適合の旧規格の商品が見受けられることがあります。
旧規格品の使用は正確な検診の妨げとなり、難聴を見逃すリスクにつながります。サンワではJIS規格適合品への買い替えサポートも行っています。是非ご相談ください。

■予算に応じて価格ご相談預かります
まとめてお受けする台数や、ご依頼の時期によりご予算に応じて価格のご相談を預かります。
※通常ご依頼の集中する1~3月を避け、比較的空いている夏場などにご依頼いただくことをお勧めします。

■初回校正無料
サンワのオーディオメータは初回校正無料のサービス付き。お気軽にご相談ください。

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
■商品のサイズ、質量などは全て(約)の値です。
■このカタログは、2025年4月現在のものです。 [10633]

sanwa
株式会社 三和製作所
〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8
tel.03-5607-7811(代) fax.03-5607-7812
https://www.sanwa303.co.jp



皆様をサポートするお近くの代理店



sanwa




ボタン2つで、スムーズ検査。

※特許出願中 特願2025-049208

オートモード

聴力検査を、ワンタッチで自動化。オートモードを搭載し、AUTOボタンを押すごとに右1000Hz→右4000Hz→左1000Hz→左4000Hzの順に切り替え。操作は検査音ボタンと合わせてたった2つのボタンだけ。複雑な操作による手間がなく、検査担当者の負担を大幅に軽減します。

1回目

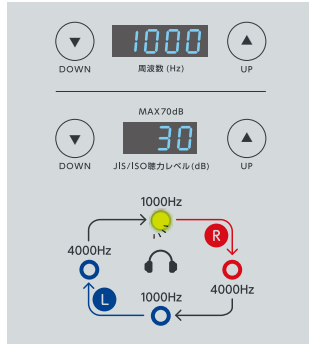


右 R 周波数1000Hz

2回目




右 R 周波数4000Hz

3回目

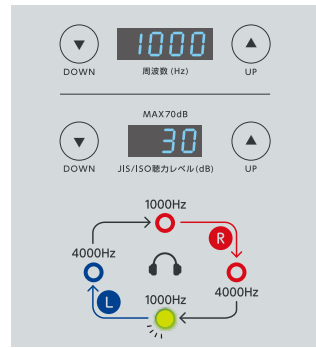


左 L 周波数1000Hz

4回目

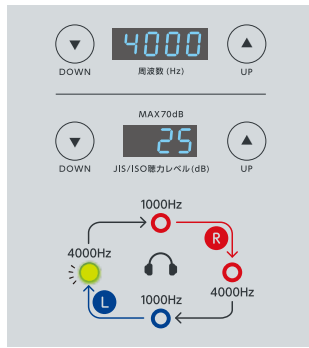

左 L 周波数4000Hz

終了

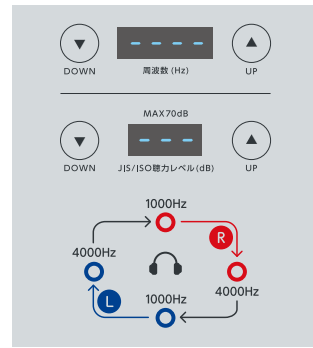

検査終了
もう一度押すと、1回目に戻る

※表示例は「学校保健安全法」モードの場合です。表示される聴力レベルは各種選別検査の設定により異なります。

マニュアルモード

従来のマニュアル操作にも対応。周波数や聴力レベルを調整できるので、再検査や特定の条件に合わせた細かいチェックもスムーズに行えます。

3つの検査モード

学校検診・雇い入れ検診・一般検診の3モードを選択可能。場面に応じた適切な検査を、スムーズに実施できます。

断続音設定切替スイッチ

連続音と断続音の設定を切り替えられます。(一般検診等でご使用になれます。)



収納も持ち運びも、ちょうどいい。

本体は450g、厚さ2.3cmのタブレット型。コンパクトだから、収納も持ち運びもスマートに。



※画像は本体のサイズイメージです



見やすく、使いやすく、手元隠しにも。

3段階の角度調整が可能。手元を隠して検査の精度を向上します。



清潔 & 堅牢で、長く使える。

イヤークッションは、アルコール消毒OKで衛生的。耐久性の高い設計で、長く安心して使えます。



信頼の日本製、メンテナンスも安心。

安心の国内製造 & 定期校正も社内に対応。長く使える品質と、安心のアフターサポートをお約束します。

